

お知らせ

INFORMATION

No.2022-01

2022 年 1 月

病体生理研究所

サイトメガロウイルス核酸定量 採取容器の変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用頂きまして誠に有り難うございます。

この度、検査実施先の新前処理機器採用に伴う変更により、サイトメガロウイルス核酸定量専用容器を変更させていただきますのでご案内致します。

何卒ご了解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【サイトメガロウイルス核酸定量専用容器の変更】

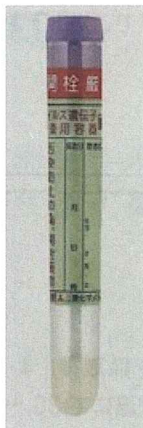
◆ 詳細は裏面をご参照下さい。

《新容器の受付開始日》

2022 年 2 月 1 日(火)ご依頼分より受託開始

※ 旧容器での受付は 2022 年 2 月 28 日(月)までとなります。

※ 検査方法・基準値に変更はありません。

サイトメガロウイルス核酸定量 新容器		旧容器
容器番号	74.サイトメガロウイルス用	57.HIV RNA 用
採血量	5mL	8mL
外径×長さ	13×100 mm	16.2×100 mm
管容量	7mL	10mL
添加剤	EDTA 2K 9mg	EDTA 2K 14.4mg
血漿分離剤	ポリエステルゲル	オレフィン系高分子化合物と二酸化ケイ素粉末を主成分とした混合物
材質	プラスチック	PET 樹脂
貯法	4 ～ 25℃	室温
有効期限	製造から 1 年	製造から 1 年
コード 16348 検査案内 掲載頁 P.84 P.129 検査 実施先 S	検体取り扱い方法 指定の採取量を指定容器に採血後、4～5 回静かに転倒混和し、室温にて遠心分離しそのまま凍結してご提出ください。 絶凍 他項目との重複依頼は避けてください。本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので検体採取にあたっては取り扱いに充分ご注意ください。	専用容器に 8mL 採血し、4～5 回静かに転倒混和後遠心分離。そのまま凍結にてご提出ください。 絶凍 他項目との重複依頼は避けてください。本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので検体採取にあたっては取り扱いに充分ご注意ください。
容器写真		

以上