

お知らせ

INFORMATION

No.2024-13
2024年5月
病体生理研究所

『2024～2025年 検査案内』変更内容一覧のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

さてこの度、当研究所『2024～2025年 検査案内』の掲載事項のうち、2023年4月以降に変更となりました、検査方法・基準値、新規掲載項目などの内容を取りまとめましたのでご案内いたします。

何卒、ご利用頂けますようご案内申し上げます。

敬具

記

【対象印刷物】

◆ 『2024～2025年度検査案内書』

以上

新規掲載項目

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
39	16253	遊離メタネフリン2分画	EDTA2Na 血漿 1.5	11 ↓ 7	絶対凍	ELISA	遊離メタネフリン 130 以下pg/mL 遊離ノルメタネフリン506 以下pg/mL (空腹時仰臥位20分以上 安静時)	6 ↓ 14	450 生化 II	測定値が上昇する恐れがあるため、空腹時に仰臥位にて20分間安静にしたあとに採血して下さい。採血後30分以内に血漿分離して下さい。溶血・乳びでのご依頼は避けてください。

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
43	16448	遊離HCG-β (HCG-β サブユニット)	血清 0.5	1 ↓ 5	冷蔵 (21日)	CLIA	1.00 未満 ng/mL	3 ↓ 6	129 生 II [1]	

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
47	38220	ガストリン	血清 0.5	1 ↓ 7	絶対凍 (21日)	RIA PEG法	11.9～46.9 pmol/L	3 ↓ 8	101 生化 II	安静、空腹時に(10時間以上空ける)採血してください。血清分離後、速やかに凍結保存してください。

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
49	38140	PIVKA-II	血清 0.5	1 ↓ 5	冷蔵	CLEIA	40未満 mAU/mL	2 ↓ 3	131 生 II [3]	

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
50	30141	SCC抗原	血清 0.4	1 ↓ 5	冷蔵	ECLIA	2.5以下 ng/mL	2 ↓ 3	101 生 II [3]	

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
52	30761	I型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)	早朝 二番尿 3	8	冷蔵 (14日)	CLEIA	nmol/mm.Cre	4 ↓ 6	156 生化 II [1][3]	
	30765	デオキシピリジノリン(DPD)	早朝 二番尿 3	8	冷蔵 (7日)	CLEIA	M:2.1～5.4 F:2.8～7.6 nM/mM.Cre	3 ↓ 6	191 生化 II [1][3]	

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
58	38012	ミエリン塩基性蛋白(MBP)	髄液 0.5	7	絶対凍 (28日)	ELISA	102以下(参考値) pg/mL		570 尿・便 [2]	

[2]多発性硬化症の診断の目的で行った場合に算定する。

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
63	38160	HIV抗原・抗体 (スクリーニング)	血清 0.6	1 ↓ 5	冷蔵	CLEIA	(-)1.0未満 Cut off index	2 ↓ 3	127 免疫 [4]	

頁	コード	検査項目	検体 必要量	容 器	保存	検査方法	基準値・単位	所要 日数	実施料 判断区分	備考
64	30368	HBs抗原 (HQ)	血清 0.6	1 ↓ 5	冷蔵	CLEIA	(-)0.005未満 IU/mL	2 ↓ 3	88 免疫	
	30369	HBs抗体精密測定	血清 0.6	1 ↓ 5	冷蔵	CLEIA	(-)10.0未満 mIU/mL	2 ↓ 3	88 免疫	
	30370	HBe抗原	血清 0.6	1 ↓ 5	冷蔵	CLEIA	(-)1.0未満 Cut off index	2 ↓ 3	98 免疫	
	30371	HBe抗体	血清 0.6	1 ↓ 5	冷蔵	CLEIA	(-)60未満 Inhibition%	2 ↓ 3	98 免疫	
	30372	HBc抗体	血清 0.6	1 ↓ 5	冷蔵	CLEIA	(-)1.0未満 Cut off index	2 ↓ 3	130 免疫 [2]	
	30373	HBc抗体 IgM	血清 0.6	1 ↓ 5	冷蔵	CLEIA	(-)1.0未満 Cut off index	2 ↓ 3	146 免疫 [2]	

2024年 検査案内変更一覧

頁	コード	検査項目	変更箇所	新	従来	変更日
12	12708	ハイドロキシプロリン	所要日数	5～19日	8～12日	20240401
12	11650	プロコラーゲンⅢペプチド (P-Ⅲ-P)	所要日数	4～8日	4～7日	20240401
15	10236	ビタミンB1 (VB1) (チアミン) (サイアミン)	測定方法	LC-MS	LC-MS/MS	20240501
24	11830	マンガン (血液)	検査方法	ICP-MS	原子吸光法	20231002
			所要日数	6～12日	4～7日	
24	11828	マンガン (尿)	検査方法	ICP-MS	原子吸光法	20231002
			所要日数	6～12日	4～7日	
27	11800	フェノバルビタール	検査方法	ラテックス凝集 免疫比濁法	EMIT	20240104
27	11801	フェニトイン	検査方法	ラテックス凝集 免疫比濁法	EMIT	20240104
27	11802	カルバマゼピン	検査方法	ラテックス凝集 免疫比濁法	EMIT	20240104
27	11804	バルプロ酸ナトリウム	検査方法	ラテックス凝集 免疫比濁法	EMIT	20240104
28	10299	ジゴキシン	検査方法	ラテックス凝集 免疫比濁法	EMIT	20240104
28	17198	レベチラセタム	検査方法	LC-MS/MS	LC-MS/MS	20240401
29	11918	キニジン	検査方法	KIMS	EIA	20240401
29	15946	ピルメノール	所要日数	4～11日	4～7日	20240401
30	12165	アミカシン	検査方法	KIMS	EIA	20240401
30	13061	バンコマイシン	検査方法	ラテックス凝集 免疫比濁法	EMIT	20240104
31	11809	テオフィリン	検査方法	ラテックス凝集 免疫比濁法	EMIT	20240104
39	10266	VMA (血漿)	所要日数	5～8日	4～8日	20240401
39	12405	セロトニン (血漿)	所要日数	4～11日	4～9日	20240401
47	13179	膜ホスホリパーゼA2 (膜PLA2)	所要日数	3～7日	3～6日	20240401
49	17385	AFPレクチン分画	保存安定性	冷蔵 (21日)	冷蔵	20240501
49	17040	抗p53抗体	検体必要量	0.5mL	0.4mL	20240501
49	13146	BCA225	検体必要量	0.5mL	0.4mL	20240501
50	12869	シアリルTn抗原 (STN)	所要日数	3～7日	3～6日	20240401

頁	コード	検査項目	変更箇所	新	従来	変更日
50	16402	HE4(ヒト精巢上皮蛋白4)	備考	日本人卵巣癌患者における病態の経過観察としてのカットオフ値：70.0pmol/L以下 (閉経前、閉経後)	—	20240401
54	14529	ER免疫組織染色 (エストロゲンレセプター)	提出検体材料	未染標本スライド4枚	パラフィンブロック 1×1×1mm以上 10×10×5mm以下	20240401
54	14530	PgR免疫組織染色 (プロゲステロンレセプター)	提出検体材料	未染標本スライド4枚	パラフィンブロック 1×1×1mm以上 10×10×5mm以下	20240401
54	14528	HER2/neuタンパク (染色法)〔酵素抗体法〕	提出検体材料	未染標本スライド4枚	パラフィンブロック 1×1×1mm以上 10×10×5mm以下	20240401
58	16424	ロイシンリッチα2 グリコプロテイン	保存安定性	冷蔵(7日)	冷蔵	20240501
59	12253	抗CCP抗体	所要日数	3～5日	2～3日	20231002
			検査実施 施設	LSIメディエンス	病体生理研究所	
60	15281	抗デスモグレイン1抗体	検体必要量	0.5mL	0.4mL	20240501
60	15282	抗デスモグレイン3抗体	検体必要量	0.5mL	0.4mL	20240501
60	14678	抗BP180抗体	検体必要量	0.5mL	0.4mL	20240501
62	10636	抗GBM抗体 (抗糸球体基底膜抗体)	検体必要量	0.5mL	0.4mL	20240501
63	12494	HTLV-1抗体〔CLEIA〕	所要日数	2～3日	4～7日	20240325
			検査実施 施設	病体生理研究所	SRL	
63	17044	HIV-1RNA定量	保存安定性	冷蔵(6日)凍結不可	冷蔵	20240501
65	13300	HCV抗体-Ⅲ	下限報告 (単位)	0.1> Cut off index	0.0 Cut off index	20231002
			上限報告 (単位)	84.0< Cut off index	50.0< Cut off index	
65	16961	HCV薬剤耐性変異解析(NS5A)	所要日数	不定期	9～13日	20240401
67	16950	レジオネラ核酸同定	所要日数	4～11日	4～6日	20240501
69	16971	トキソプラズマ抗体 IgG	所要日数	3～5日	2～3日	20231002
			検査実施 施設	LSIメディエンス	病体生理研究所	
69	16974	トキソプラズマ抗体 IgM	所要日数	3～5日	2～3日	20231002
			検査実施 施設	LSIメディエンス	病体生理研究所	

頁	コード	検査項目	変更箇所	新	従来	変更日
73	17094	TARC (Th2ケモカイン)	備考	トロンビン入り採血管は測定値に影響を与える恐れがあるため使用を避けてください。	血漿はデータ低下が見られますので避けてください。トロンビン入り採血管は測定値に影響を与える恐れがあるため使用を避けてください。	20230714
			基準値	16歳以上：450未満	成人：450未満	20240501
78		アデノウイルス	所要日数	8～22日	8～15日	20240501
79		エコーウイルス	所要日数	6～22日	8～15日	20240501
79		コクサッキーウイルスA群	所要日数	8～22日	8～15日	20240501
80		エンテロウイルス	所要日数	7～21日	8～15日	20240501
89	11634 11635 11636	LST(1薬剤、2薬剤、3薬剤)	検体必要量	12.0mL (+各5.0mL)	9.0mL (+各5.0mL)	20240501
93	16475	ROS1融合遺伝子定性 (FFPE)	所要日数	5～10日	5～9日	20230707
99	60056	アンチトロンビン活性 (AT)	検査項目	アンチトロンビン活性 (AT)	アンチトロンビンⅢ (AT-Ⅲ)	20231002
100	62269	ADAMTS13活性	備考	必ずADAMTS13検査専用検体としてご提出ください。(重複依頼不可)	—	20240401
100	62265	ADAMTS13インヒビター定量				

中止項目

日付	中止項目		代替項目	
	項目コード	項目名	項目コード	項目名
23年7月	16449	遊離HCG- β (HCG- β サブユニット) (血清)	16448	遊離HCG- β (HCG- β サブユニット)
23年7月	14225	血清I型コラーゲン架橋N-テロペプチド(血清NTx)		
23年8月	11127	アデノウィルス8型 (NT)		
23年8月	11066	ミエリンベースック蛋白 (MBP)	38012	ミエリン塩基性蛋白 (MBP)
23年9月	12559	PIVKA-II	38140	PIVKA-II
23年9月	12141	SCC抗原	30141	SCC抗原
23年9月	14997	HIV抗原・抗体 (スクリーニング)	38160	HIV抗原・抗体 (スクリーニング)
23年9月	10368	HBs抗原精密測定	30368	HBs抗原(HQ)
23年9月	10369	HBs抗体精密測定	30369	HBs抗体精密測定
23年9月	10536	HB _e 抗原	30370	HB _e 抗原
23年9月	10537	HB _e 抗体	30371	HB _e 抗体
23年9月	11110	HB _c 抗体	30372	HB _c 抗体
23年9月	11280	HB _c 抗体 IgM	30373	HB _c 抗体 IgM
24年2月	13758	チミジンキナーゼ活性		
24年3月	11167	TPA (組織ポリペプチド抗原)		
24年3月	15172	尿中IV型コラーゲン	12406	尿中マイクロアルブミン (尿中微量アルブミン)
			12242	尿中マイクロアルブミン (尿中微量アルブミン)
24年3月	12367	α 1-アンチキモトリプシン		
24年3月	12772	尿中核マトリックスプロテイン22 (NMP22)		
24年3月	12189	HTLV-I 抗体 [PA]	12494	HTLV-I 抗体 [CLEIA]
24年3月		肺癌ALK遺伝子 (FISH)		
24年3月	14285	デオキシピリジノリン	30765	デオキシピリジノリン (DPD)
24年3月	14222	I型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx)	30761	I型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTX)
24年3月	60626	PFDテスト		
24年3月		マイコプラズマ培養	17464	マイコプラズマニューモニエDNA

