

# お知らせ

INFORMATION

No.2014-27  
2014年8月

病体生理研究所

## 新規受託開始のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当研究所をご利用いただきまして誠に有り難うございます。

この度、下記検査項目におきまして、新たに受託を開始させて頂くことになりましたので  
ご案内いたします。

何卒、ご利用頂けますようお願い申し上げます。

敬具

記

### 【新規受託開始について】

◆ 特異的 IgE Ara h 2 (ピーナッツ由来) (F423) [16940]

※項目情報裏面参照

※ 受託開始日：2014年8月1日（金）より

【新規項目情報】

| 項目名称  | 特異的 IgE Ara h 2 (ピーナッツ由来)<br>F 423   |  |    |             |    |         |     |           |    |         |
|-------|--|--|----|-------------|----|---------|-----|-----------|----|---------|
| コード   | 16940  |  |    |             |    |         |     |           |    |         |
| 検体材料  | 血清 0.4mL   |  |    |             |    |         |     |           |    |         |
| 保 存   | 冷蔵   |  |    |             |    |         |     |           |    |         |
| 採取容器  | ①→⑤  |  |    |             |    |         |     |           |    |         |
| 検査方法  | 蛍光酵素免疫測定法(FEIA)  |  |    |             |    |         |     |           |    |         |
| 基準値   | (-) 0.34 以下 (UA/mL)  |  |    |             |    |         |     |           |    |         |
| 判定基準  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>判定</th> <th>抗体価 (UA/mL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>陰性</td> <td>0.34 以下</td> </tr> <tr> <td>疑陽性</td> <td>0.35~3.99</td> </tr> <tr> <td>陽性</td> <td>4.00 以上</td> </tr> </tbody> </table> |  | 判定 | 抗体価 (UA/mL) | 陰性 | 0.34 以下 | 疑陽性 | 0.35~3.99 | 陽性 | 4.00 以上 |
| 判定    | 抗体価 (UA/mL)  |  |    |             |    |         |     |           |    |         |
| 陰性    | 0.34 以下  |  |    |             |    |         |     |           |    |         |
| 疑陽性   | 0.35~3.99  |  |    |             |    |         |     |           |    |         |
| 陽性    | 4.00 以上  |  |    |             |    |         |     |           |    |         |
| 所要日数  | 3~6 日  |  |    |             |    |         |     |           |    |         |
| 実施実施料 | 110 点 (D015 11)  |  |    |             |    |         |     |           |    |         |
| 検査判断料 | 144 点 (免疫学的検査)   |  |    |             |    |         |     |           |    |         |
| 備考    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特異的 I g E ピーナッツの陽性者が対象です。</li> <li>・ クラス判定報告はございません。このためアレルギー専用報告書でのご報告は行いません。</li> </ul>   |  |    |             |    |         |     |           |    |         |

◆ 特異的 IgE Ara h 2 (ピーナッツ由来)

ピーナッツ (落花生) は、「特定原材料」として食品への表示が義務付けられている食物アレルギーの1つです。また、アナフィラキシーショックを含む多臓器にわたる重篤な症状が多いアレルギーとして知られ、小児の乳製品・卵・大豆アレルギーとは異なり、経年的な耐性が得られにくいといわれています。

Ara h 2 はピーナッツのアレルゲンコンポーネント\*のうちの1つで、臨床症状発現との強い関連性が報告されており、本検査は、粗抽出アレルゲンであるピーナッツ特異的 IgE 検査 陽性患者におけるアレルギー診断補助に有用です。従来の診断フローに加えることで、ピーナッツアレルギーの疑いのある患者およびその家族の QOL 向上に役立つ可能性があるとして期待されています。

\*アレルゲンコンポーネント：アレルギー原因食品から抽出されるタンパク質の中の単一のタンパク質

以上